



Jeûne de 8h minimum

Il est possible de boire un verre d'eau ou un café non sucré et sans lait.

Il est recommandé de prendre un repas léger la veille au soir.

Pour les autres dosages, une période de jeûne est recommandée mais non obligatoire.

EXAMENS	TYPE DE PRELEVEMENT ET AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES
ACIDES GRAS LIBRES NON ESTERIFIES OU LIBRES (ENVOI)	1 Tube sec 5 ml dans la glace à centrifuger et décanter dans les 2 h suivant le prélèvement puis congeler le sérum.
APOLIPOPROTEINES A1	Sérum
APOLIPOPROTEINES B (ENVOI)	Sérum
CHOLESTEROL	Sérum
CHOLESTEROL LDL	Sérum
CROSS-LAPS : SERUM (CTX) (ENVOI)	Sérum ou plasma non hémolysé. Centrifuger dans les 3 heures après le prélèvement. (veiller à prélever dans la même tranche horaire dans le cadre d'un suivi)
CRYOGLOBULINES	Préchauffer les tubes et aiguille à 37 °C avant prélèvement à jeun. Conserver les échantillons impérativement à 37 °C (domicile déconseillé)
FER SERIQUE	Sérum
GASTRINE (ENVOI)	Sérum à centrifuger et congeler immédiatement (domicile déconseillé)
GLYCEMIE A JEUN	Plasma fluoré
HELICOBACTER PYLORI : TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C (ENVOI)	Kit spécial à acheter en pharmacie Sujet à jeun depuis la veille, au repos sans boire ni manger ni fumer pendant l'épreuve (temps de recueil de l'air expiré à T0 et T30) Le test doit être réalisé après : • Arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines • Arrêt des antisécrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2, etc...) • Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures
HOMOCYSTEINE (ENVOI)	1 Tube EDTA 5 ml maintenu à + 4° C centrifugation immédiate à + 4° C - décantation - congélation du plasma à - 20°C dans l'heure
PHOSPHORE	Sérum
TESTOSTERONE BIODISPONIBLE (ENVOI)	Sérum à 4°C
TRIGLYCERIDES	Sérum
XYLOSE (ENVOI)	Sérum à 4°C